

MOVIMENTAZIONE PAZIENTE

BARELLA TELO PORTAFERITI SEDIA PORTANTINA

Storti Chiara Francesca
Istruttore PSTI

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA

Strumento fondamentale per il **TRASPORTO DEI PAZIENTI**. Le **OPERAZIONI** normalmente eseguite con la barella sono:

- **SCARICAMENTO** della barella
- **AVVICINAMENTO** al paziente
- **CARICAMENTO** del paziente
- **RITORNO** all'ambulanza
- **CARICAMENTO** della barella sull'ambulanza

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA USO: SOCCORRITORI

Per adoperare la barella in condizioni di massima sicurezza sono richiesti **ALMENO 2 SOCCORRITORI** in buone condizioni fisiche:

- capacità di **AFFERRARE SALDAMENTE** con entrambe le mani
- forza nella schiena e nelle gambe
- buon **EQUILIBRIO**
- buoni **RIFLESSI**
- **COORDINAZIONE MUSCOLARE** e tra operatori

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA SCARICAMENTO DA AMBULANZA

E' dotata di **METODI di BLOCCAGGIO e SBLOCCAGGIO** che possono differire nei modelli.

ESISTE SEMPRE un FERMO che impedisce alla barella di muoversi durante il tragitto in ambulanza.



Corso formativo PSTI per i Volontari della Croce Rossa Italiana

BARELLA SCARICAMENTO DA AMBULANZA

Eseguire l'**OPERAZIONE DI SCARICO**

Un soccorritore ai piedi della barella **SBLOCCA** il fermo di sicurezza, **CONTROLLA LO SPAZIO** necessario sia libero. Fare attenzione ai blocchi, perché le gambe della barella devono aprirsi!

Un secondo soccorritore, a lato della barella, **VERIFICA** che nell'estrazione le gambe scendano regolarmente e si blocchino nella giusta posizione.

Corso formativo PSTI per i Volontari della Croce Rossa Italiana

BARELLA SCARICAMENTO DA AMBULANZA



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA ABBASSARE/ALZARE

Per **ABBASSARE** la barella, i due soccorritori si posizionano uno alla testa ed uno ai piedi. Deve essere **SGANCIATI I FERMI** che blocca le gambe (ci sono **DUE LEVE**: testa e piedi).



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA UTILIZZO

ABBASSARE la barella o MANTENERLA alzata, in base alle esigenze del paziente.

POSIZIONARE il paziente sulla barella:

COPRIRLO e **ASSICURARLO** con le apposite cinghie.

RACCOMANDARE al paziente di non eseguire movimenti e tantomeno di attaccarsi a nulla durante lo spostamento (soprattutto durante il caricamento o lo scaricamento dall'ambulanza).

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA SCHIENALE

Può essere lasciato **ORIZZONTALE** o **INCLINATO** e, a seconda del modello, può essere bloccato in varie posizioni.

SORREGGERE lo schienale con una mano, per evitare movimenti improvvisi, ed **AZIONARE LA LEVA** di regolazione dell'inclinazione con l'altra mano. Rilasciare la leva di controllo quando viene raggiunta l'inclinazione desiderata: abbassare lo schienale per far scattare il **FERMO**.

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA BRACCIOLI e POGGIPIEDI

Ci sono **2 BRACCIOLI LATERALI** che si bloccano automaticamente in **POSIZIONE VERTICALE** e devono essere in questa posizione tutte le volte che un infortunato è sulla barella.

Si sbloccano tirando l'apposita spina di bloccaggio.

Il **POGGIPIEDI** in fondo alla barella va lasciato in posizione verticale, per prevenire lo scorrimento del materasso e proteggere i piedi del paziente:
NON E' UNA MANIGLIA!

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA GRUPPO ANTISHOCK

E' una porzione della barella che consente di **TENERE SOLLEVATE LE GAMBE** del trasportato al fine di favorire l'afflusso di sangue agli organi vitali.

Per alzare il gruppo antishock **SOLLEVARE** la parte terminale della barella (lato piedi): si innesteranno automaticamente delle **BARRE DI SUPPORTO**. Per abbassare il gruppo azionare il dispositivo di sblocco.

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA TRASPORTO DEL PAZIENTE



Alzare sempre i
BRACCIOLI LATERALI

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA CARICAMENTO IN AMBULANZA

Eseguire l'**OPERAZIONE DI CARICO**

Un soccorritore alla testa della barella **DIRIGE** la barella sul piano e **LA SOSTIENE**, **CONTROLLANDO** che non esca dalla rotaia.

Un secondo soccorritore **INSERISCE** la barella fino a poggiare le gambe frontali alla carrozzeria, le **SBLOCCA**, solleva la barella e la spinge fino a poggiare le gambe posteriori sulla carrozzeria, le **SBLOCCA** e continua il caricamento.

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA CARICAMENTO IN AMBULANZA



Alzare sempre i
BRACCIOLI LATERALI

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA SICUREZZA

Entrambi i SOCCORRITORI devono partecipare al caricamento della barella per scongiurare problemi, cadute, cedimenti (sia fisici che meccanici).

Una volta caricata, assicuratevi che la barella sia **BLOCCATA** in modo da prevenire il movimento durante il moto del veicolo.

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

BARELLA DOMANDE???



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI

E' progettato per TRASPORTATE PAZIENTI che **NON PRESENTANO TRAUMI SPINALI** o che necessitino di sussidi rigidi. UTILIZZO:

- trasporto sino alla barella
- trasporto/trasferimento da letto a barella
- trasporto/trasferimento da barella a letto

Va usato SOLO per scopi PROFESSIONALI e SOLO quando è in CONDIZIONI di PERFETTA EFFICIENZA/MANUTENZIONE.

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI

USO: SOCCORRITORI

Per adoperare il telo in condizioni di massima sicurezza sono richiesti **ALMENO 2 SOCCORRITORI** in buone condizioni fisiche:

- forza nella schiena, nelle braccia e nelle **GAMBE** (per sollevare il peso)
- buon **EQUILIBRIO**
- buoni **RIFLESSI**
- **COORDINAZIONE MUSCOLARE** e tra operatori

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI

MODALITA' D'USO

Porre l'infortunato in **POSIZIONE PRONA** e disporsi ciascuno su un lato: fa **RUOTARE** l'infortunato su un fianco.

PIEGARE IL TELO o arrotolarne una metà verso di sé, nel senso della lunghezza, facendo attenzione a lasciare le cinte verso l'esterno.



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI MODALITA' D'USO

Adagiare il telo così piegato accanto all'infortunato facendo attenzione che la **PARTE CENTRALE** si trovi all'altezza del bacino (o comunque con la testa all'interno del telo).

RUOTARE l'infortunato sul fianco opposto e **STENDERE** il telo sotto l'infortunato.



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI TRASPORTO


Nel percorrere le **SCALE** i **PIEDI** del trasportato sono sempre rivolti **VERSO IL BASSO**



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI IMPUGNATURA DELLE MANIGLIE

Impugnare le maniglie in modo sicuro, facendo passare la mano attraverso la maniglia stessa

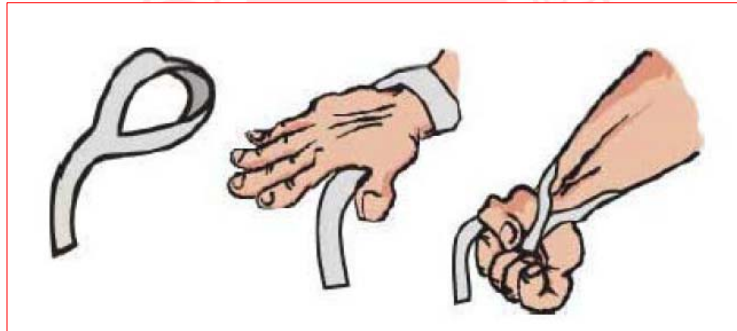

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

TELO PORTAFERITI DOMANDE???



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

SEDIA PORTANTINA

SEDIA PIEGHEVOLE

dotata di due coppie di **MANICI** (spesso telescopici) a livello dello **SCHIENALE** e delle **RUOTE ANTERIORI**

Il paziente può essere assicurato alla sedia con **DUE CINTURE DI SICUREZZA**

NON E' INDICATA AL TRASPORTO DEL PAZIENTE DURANTE IL VIAGGIO IN AMBULANZA!!!

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

SEDIA PORTANTINA



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

SEDIA PORTANTINA

UTILIZZO

APRIRE LA SEDIA ed assicurarsi che la sicura sia inserita.

POSIZIONARE il paziente sulla sedia: **COPRIRLO** e **ASSICURARLO** con le apposite cinghie.

RACCOMANDARE al paziente di non eseguire movimenti e tantomeno di attaccarsi a nulla durante lo spostamento (soprattutto sulle scale).

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

SEDIA PORTANTINA

SCENDERE LE SCALE

Nel percorrere le **SCALE** i **PIEDI** del trasportato sono sempre rivolti **VERSO IL BASSO**.



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

SEDIA PORTANTINA DOMANDE???



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

MOVIMENTAZIONE PAZIENTI DA SEDIA A BARELLA



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

MOVIMENTAZIONE PAZIENTI CON TRAVERSA o LENZUOLA



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

MOVIMENTAZIONE PAZIENTI ERRORI DA EVITARE



Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana



Bibliografia

MANUALISTICA TECNICA dei PRESIDI

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana

-THE END -



CI VUOLE SOPRATTUTTO PRATICA!

Corso formativo PSTI per i Volontari
della Croce Rossa Italiana